

# AFDRUKKEN MET BORDER-LOCK®-LEPELS

## Gebruiksaanwijzing

### Betande kaak

#### Benodigd:


- passer (#52900), met blauwe meetplaatjes, voor de betande kaak
- maatsjabloon voor de betande bovenkaak (#54950)



#### 1. Bepalen van de breedte van de gebitsboog

**Bovenkaak:** positioneer de blauwe meetplaatjes vestibulair van de 2<sup>e</sup> premolaar tot en met de 2<sup>e</sup> molaar.

**Onderkaak:** positioneer de meetplaatjes linguaal van de 2<sup>e</sup> premolaar tot en met de 2<sup>e</sup> molaar.

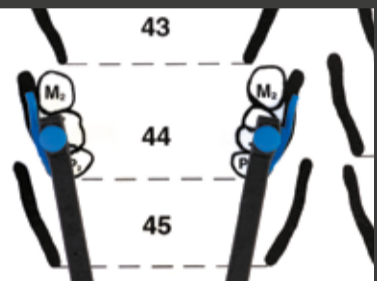

#### 2A. Lepelselectie (42 t/m 49) betande bovenkaak met behulp van maatsjabloon

Plaats de passer op het maatsjabloon zodat de blauwe meetplaatjes de zwarte strepen bedekken.

**N.B.:** zorg dat aan weerskanten de convexe zijde van de meetplaatjes naar buiten is gedraaid.



#### 2B. Lepelselectie (51 t/m 58) betande onderkaak met behulp van maatsjabloon

Plaats de passer op het maatsjabloon zodat de blauwe meetplaatjes de zwarte strepen bedekken.

**N.B.:** zorg dat aan weerskanten de concave zijde van de meetplaatjes naar buiten is gedraaid.

### Controle



#### 3. Controle van de pasvorm van de gekozen lepel

Torus palatinus voorkomt het correct op zijn plaats komen van de lepel. Een individuele aanpassing van de lepel is hier noodzakelijk.

### Vervormen



#### 4. Verwarmen van de lepel

Plaats de lepel gedurende 30-60 seconden in heet water van minimaal 65 °C.

#### 5. Plastische vervorming van de lepel

Houd de gewenste positie 5-10 seconden vast. Pas in de mond en herhaal indien nodig de procedure. Spoel de lepel af met koud water. Droog de lepel zorgvuldig.



### Onbetande kaak

#### Benodigd:

- passer (#51900) voor de onbetande kaak
- maatsjabloon (#52910) voor de onbetande bovenkaak



#### 1. Bepalen van de breedte van de gebitsboog

**Bovenkaak:** meet in de mond, met behulp van de passer, de grootste afstand tussen de buccale wanden van de processus alveolaris.

**Onderkaak:** meet in de mond, met behulp van de passer, de afstand tussen de beide tubercula retromolare.

#### 2A. Lepelselectie (31 t/m 35) onbetande bovenkaak met behulp van maatsjabloon

Plaats de passer op het maatsjabloon en lees het corresponderende lepelnummer af.

#### 2B. Lepelselectie (21 t/m 25) onbetande onderkaak met behulp van maatsjabloon

Plaats de passer op het maatsjabloon en lees het corresponderende lepelnummer af.

#### TIPS VOOR DE JUISTE LEPELSELECTIE:

- Bij gebruik van Impregum™ (3M ESPE) afdruckmateriaal is het aan te bevelen om de lepel niet te krap te kiezen, maar liever een maatje groter te nemen.
- De lepel moet posterieur ongeveer 5 mm naar links en naar rechts te bewegen zijn.

#### LET OP:

- Het gebruik van adhesief verbetert de kwaliteit van de afdruk.
- Elk afdruckmateriaal heeft zijn eigen adhesief.
- Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.